

IPS Empress Direct® crea effetti speciali

Flow

Color

Opaque



IPS Empress Direct® System



IPS Empress Direct®



IPS Empress Direct® è un composito nanoibrido universale per procedure di restauro dirette altamente estetiche, disponibile in 32 colori e 5 livelli di traslucenza. L'opacità, la fluorescenza e l'opalescenza del tutto naturali di IPS Empress Direct nonché la sua lucidabilità a specchio consentono di creare restauri estetici assolutamente naturali con notevole efficienza.

Dal punto di vista chimico, i riempitivi contenuti in IPS Empress Direct presentano le medesime componenti principali dei materiali ceramici IPS Empress. Ciò consente di realizzare restauri diretti di elevata qualità estetica. Il composito IPS Empress Direct è pertanto il perfetto completamento del sistema IPS Empress.

IPS Empress Direct:

- Sicurezza
- Affidabilità
- Estetica



Dr Arnd Peschke, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

IPS Empress Direct crea effetti speciali

L'arte di ricreare un sorriso naturale: il sistema IPS Empress Direct comprende tre diversi colori Effect per consentire di riprodurre nel restauro le medesime caratteristiche vitali del dente naturale.



IPS Empress Direct Flow „Art“

Flowable fotopolimerizzabile, altamente estetico, in tre colori, per la realizzazione di speciali effetti naturali nel settore anteriore.



IPS Empress Direct Color

Composito altamente estetico in sette colori, per la caratterizzazione cromatica individuale e la mascheratura di lievi discromie.



IPS Empress Direct Opaque

Materiale opacizzante fotopolimerizzabile in colore universale per la mascheratura di strutture dentali scolorite e superfici metalliche esposte.

I tre colori Effect sono ottimamente coordinati con i materiali del sistema IPS Empress, per conferire ai restauri IPS Empress Direct e IPS Empress CAD un aspetto naturale altamente estetico.

IPS Empress Direct Flow „Art“

CREATIVITÀ FLUIDA NEI SETTORI ANTERIORI



IPS Empress Direct Flow “Art” è il complemento ideale di IPS Empress Direct quando si tratta di riprodurre gli effetti speciali del dente naturale. Con Trans Opal Flow, ad esempio, è possibile ricreare un’opalescenza estetica naturale nella zona incisale, mentre Trans 30 consente di creare un effetto di traslucenza naturale. Bleach XL viene normalmente utilizzato per riprodurre le naturali caratteristiche individuali, come ad esempio le macchie da fluorosi.

I tre colori Effect presentano un’ottima affinità di superficie e al tempo stesso notevole stabilità. Grazie alla loro consistenza ottimale, i tre colori Effect possono essere comodamente modellati con spatola o pennellino.



Applicazione di
Trans Opal Flow




Risultato finale dopo
lucidatura a specchio

Dr Eduardo Mahn, Arabia Saudita

IPS Empress Direct Color

L'ARTE DELLA CARATTERIZZAZIONE NATURALE

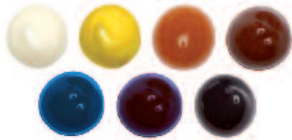

IPS Empress Direct Color comprende una selezione di sette colori per la creazione di caratterizzazioni della massima naturalezza. Il prodotto può essere utilizzato nei restauri in composito diretti, nei restauri indiretti CAD/CAM e per la mascheratura di strutture dentali scolorite.

Grazie al suo elevato contenuto di pigmenti, IPS Empress Direct Color presenta un'elevata proprietà coprente conferendo al restauro un effetto cromatico naturale, anche quando applicato in strati sottili. L'equilibrata composizione dei riempitivi dona al restauro un effetto di elevata trasparenza. IPS Empress Direct Color può essere applicato direttamente sul composito o sulla ceramica senza diluizione.

Le cannule di applicazione ultrasottili da 0,4 mm consentono un'applicazione semplice e precisa del materiale.

IPS Empress Direct Opaque


LA SEMPLICE ARTE DELLA MASCHERATURA



IPS Empress Direct Opaque è un materiale opacizzante fotopolimerizzabile ideale per la mascheratura di superfici metalliche esposte e strutture dentali scolorite. Grazie alle straordinarie proprietà coprenti di IPS Empress Direct Opaque, l'applicazione di un solo strato basta per coprire efficacemente macchie indesiderate e superfici metalliche.



Situazione iniziale

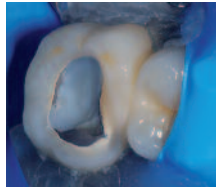

Cavità pretrattata



Mascheratura con
IPS Empress Direct
Opaque



Applicazione di
Heliobond




Caratterizzazione con
IPS Empress Direct
Color



Risultato finale

La nuova siringa LuerLock

NUOVO DESIGN PER UN' EROGAZIONE DI MASSIMO COMFORT

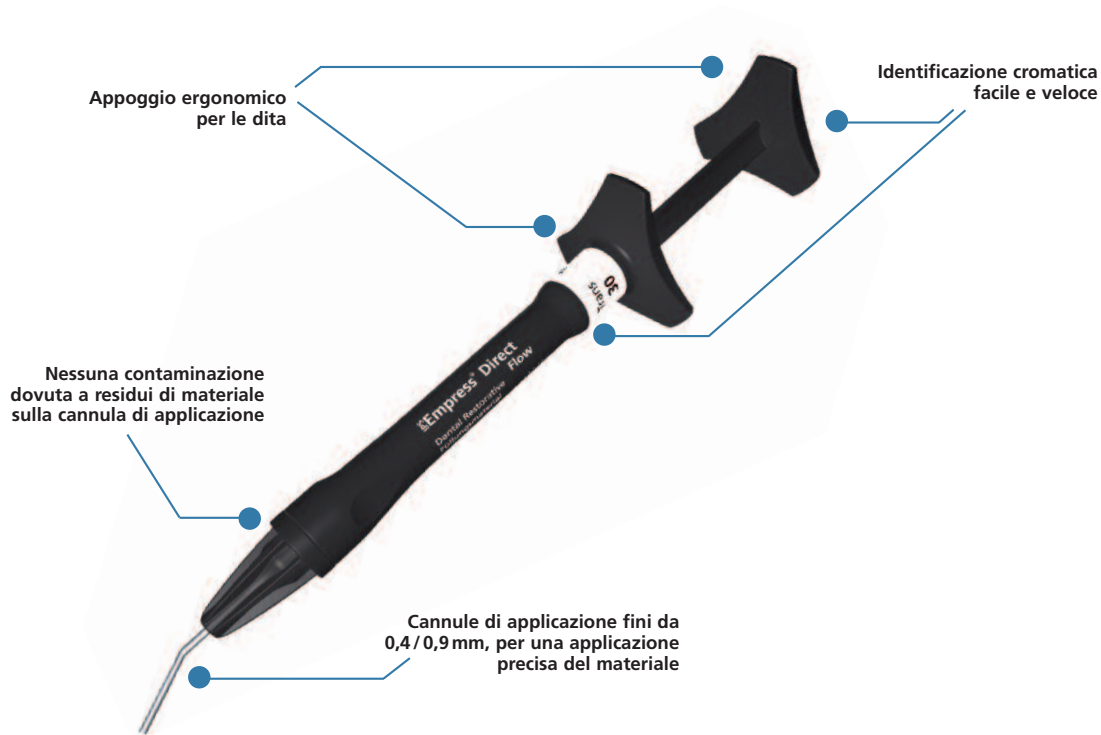

Confezionamenti

IPS Empress Direct Flow „Art“



Refill
1 x 1,8g:
Trans 30, Trans Opal, Bleach XL

IPS Empress Direct Opaque



Refill
1 x 1,8g:
Opaque

IPS Empress Direct Color



Refill
1 x 1 g:
Bianco, giallo miele, ocra, marrone,
viola, blu, grigio

IPS Empress Direct Color / Opaque Assortment

7 x 1 g IPS Empress Direct Color
Bianco, giallo miele, ocra, marrone, viola, blu, grigio
1 x 1,8g IPS Empress Direct Opaque
Opaque



Questo prodotto rientra nel field di competenza "Competence in Composites".
I prodotti di questo settore sono tutti ottimamente coordinati tra loro.

Ivoclar Vivadent s.r.l.
Via Isonzo 67/69
I-40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051 / 611 35 55
Fax +39 051 / 611 35 65
www.ivoclarvivadent.it

ivoclar
vivadent
passion vision innovation