

Programat® P310, P510, P710, EP 3010, EP 5010

Tabella programmi di cottura in °C

Versione: 9; Data di emissione: 2017-03

Validità da Software Versione V5.0 per P310, P510 / V3.0 per P710 / V4.0 per EP 3010, EP 5010

Ivoclar Vivadent		Valori in °C		B	S	t	T	H	V1	V2	L	ti	ti	ti	IRT-t*
Tabella programmi				Temperatura di esercizio [°C]	Tempo di chiusura [mm:ss]	salita di temperatura [°C]	temperatura di tenuta [°C]	tempo di tenuta [h:mm:ss]	inserimento vuoto [°C]	disinserimento vuoto [°C]	raffreddamento lento [°C]	gradiente di raffreddamento [°C]	[°C]	[h:mm:ss]	Modalità IRT
Campo di valori per tutti i programmi		MIN		100	00:18	10	100	00:00:00	0	0	0	0	0	00:00	-
		MAX		700	30:00	140	1200	01:00:00	1200	1201	1200	50	700	01:00:00	-
Gruppo di materiali	P.Nr.														
IPS Style	1	1/2. cottura Opaquer 870	m.V.	403	04:00	100	870	01:00	450	869	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	2	1/2. cottura Margin	m.V.	403	06:00	60	840	01:30	450	839	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	3	1. cottura Dent./inc./cott. One	m.V.	403	06:00	60	790	01:00	450	789	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	4	2. cottura Dent./inc./cott. One	m.V.	403	06:00	60	780	01:00	450	779	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	5	Cottura supercolori	m.V.	403	06:00	60	750	01:00	450	749	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	6	Cottura glasura/Add-On con glasura	m.V.	403	06:00	60	750	01:00	450	749	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	7	Add-On dopo cottura di glasura	m.V.	403	06:00	60	690	01:00	450	689	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
IPS InLine	21	1/2. cottura Opaquer in polvere	m.V.	403	04:00	100	960	02:00	450	959	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	22	1/2. cottura Opaquer in pasta	m.V.	403	06:00	100	930	02:00	450	929	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	23	1/2. cottura Margin	m.V.	403	04:00	60	930	01:00	450	929	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	24	1. cottura Dentina/Incisal	m.V.	403	04:00	60	910	01:00	450	909	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	25	2. cottura Dentina/Incisal	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	26	Cottura Margin Add-On	m.V.	403	04:00	60	900	01:00	450	899	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	27	Add-On dopo cottura Dent/Incis	m.V.	403	04:00	60	860	01:00	450	859	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	28	Cottura supercolori Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	29	Cottura supercolori InLine	m.V.	403	06:00	60	850	01:00	450	849	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	30	Cottura di glasura Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	830	01:00	450	829	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
IPS Empress Esthetic + CAD	31	Cottura di glasura InLine	m.V.	403	06:00	60	850	02:00	450	849	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	32	Add-On dopo cottura di glasura	m.V.	403	04:00	60	690	01:00	450	689	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	41	Cottura Wash	m.V.	403	04:00	60	840	02:00	450	839	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	42	1/2. Cottura Incisal	m.V.	403	04:00	60	830	02:00	450	829	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	43	Cottura Universal Shade / Stains	m.V.	403	06:00	100	790	01:30	450	789	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	44	Cottura supercolori Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	45	Cottura glasura universale	m.V.	403	06:00	100	790	01:30	450	789	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	46	Cottura glasura Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	47	Add-On	m.V.	403	04:00	60	770	02:00	450	769	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	61	Cottura supercol. e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
IPS e.max Press tecnica di pittura	62	Cottura supercol. Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	63	Cottura glasura e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	64	Cottura glasura Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	65	Add-On dopo glasura	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	81	Wash (Foundation)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	82	Wash caratterizzazione	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	83	1/2. Cottura Dentina/Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	84	Cottura supercol. e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	85	Cottura supercol. Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	86	Cottura glasura e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
IPS e.max Press stratificazione	87	Cottura glasura Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	88	Add-On c.cott.glas.e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	89	Add-On con cot.glasura Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	90	Add-On dopo glasura	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	101	ZirLiner prima del wax-up	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	102	Cottura supercolori e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	103	Cottura supercolori Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	104	Cottura glasura e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	105	Cottura glasura Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	106	Add-On dopo glasura	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
IPS e.max ZirPress tecnica pittura	121	ZirLiner prima del wax-up	m.V.	403	04:00	40	960	01:00	450	959	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	122	Wash (Foundation)	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	123	Wash caratterizzazione	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	124	1/2. Cottura Dentina/Incisal	m.V.	403	04:00	90 / 20	650 / 730	00:00 / 02:00	400 / 650	650 / 729	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	125	Cottura supercol. e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	126	Cottura supercolori Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	127	Cottura glasura e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	128	Cottura glasura Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	129	Add-On c.cott.glas.e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	130	Add-On con cot.glasura Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
IPS e.max ZirPress stratificazione	131	Add-On dopo glasura	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	141	Cottura supercolori Ivocolor	m.V.	403	06:00	45	710	01:00	450	709	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	142	Cottura glasura Ivocolor	m.V.	403	06:00	45	710	01:00	450	709	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	150	Cottura di rigenerazione	o.V.	403	00:18	65	1050	15:00	spento	spento	750	25	spento	00:00	spento
	161	Cristallizzazione LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 07:00	550 / 830	830 / 850	710	spento	spento	00:00	Modo cristallizzazione
	162	Cottura supercolori/correzione	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 03:00	550 / 830	830 / 850	710	spento	spento	00:00	Modo cristallizzazione
	163	Unione/cristalliz. CAD-on	m.V.	403	02:00	30 / 30	830 / 850	02:00 / 07:00	550 / 830	830 / 850	610	spento	403	06:00	Modo unione
	164	Glasura/Correzione Cad-on	m.V.	403	06:00	60 / 30	830 / 850	00:10 / 03:00	550 / 830	830 / 850	610	spento	spento	00:00	Modo cristallizzazione
	165	Cristallizzazione Speed	m.V.	403	00:30	120 / 70	850 / 870	00:00 / 03:30	690 / 850	850 / 870	705	spento	460	00:01	spento
	166	Cristallizzazione MO/imp./LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	780 / 860	00:10 / 10:00	550 / 780	780 / 860	710	spento	spento	00:00	Modo cristallizzazione
IPS e.max CAD tecnica di pittura	181	Cristallizzazione LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	90 / 30	830 / 850	00:10 / 07:00	550 / 830	830 / 850	710	spento	spento	00:00	Modo cristallizzazione
	182	Cottura supercol. e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	725	01:00	450	724	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	183	Cottura supercolori Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	184	Cottura glasura e.max Ceram	m.V.	403	06:00	60	770	01:30	450	769	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	185	Cottura glasura Ivocolor	m.V.	403	06:00	60	710	01:00	450	709	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	186	Add-On dopo glasura	m.V.	403	06:00	50	700	01:00	450	699	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
	187	Cristallizzazione MO/imp./LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	780 / 860	00:10 / 10:00	550 / 780	780 / 860	710	spento	spento	00:00	Modo cristallizzazione
	201	Cristallizzazione MO/imp./LT/MT/HT	m.V.	403	06:00	60 / 30	780 / 860	00:10 / 10:00	550 / 780	780 / 860	710	spento	spento	00:00	

Programat® P310, P510, P710, EP 3010, EP 5010

Tabella programmi di cottura in °F

Versione: 9; Data di emissione: 2017-03

Validità da Software Versione V5.0 per P310, P510 / V3.0 per P710 / V4.0 per EP 3010, EP 5010

Ivoclar Vivadent		Valori in °F										IRT-t*				
Tabella programmi												IRT-t*				
Campo di valori per tutti i programmi		MIN										IRT-t*				
Gruppo di materiali		P.Nr.										IRT-t*				
			B	S	t	T	H	V1	V2	L	ti	[°F]	[h:mm:ss]	Modalità IRT		
			Temperatura di esercizio [°F]	Tempo di chiusura [m:ss]	salita di temperatura [°F]	temperatura di tenuta [°F]	tempo di tenuta [h:mm:ss]	inserimento vuoto [°F]	disinserimento vuoto [°F]	raffreddamento lento [°F]	gradiente di raffreddamento [°F]	[°F]	[h:mm:ss]	Modalità IRT		
			212	00:18	50	212	00:00:00	32	32	32	32	32	00:00	-		
			1292	30:00	284	2192	01:00:00	2192	2194	2192	122	1292	01:00:00	-		
IPS Style		1	1/2. cottura Opaquer 870	m.V.	757	04:00	180	1598	01:00	842	1596	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		2	1/2. cottura Margin	m.V.	757	06:00	108	1544	01:30	842	1542	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		3	1. cottura Dent./Inc./cott. One	m.V.	757	06:00	108	1454	01:00	842	1452	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		4	2. cottura Dent./Inc./cott. One	m.V.	757	06:00	108	1436	01:00	842	1434	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		5	Cottura supercolori	m.V.	757	06:00	108	1382	01:00	842	1380	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		6	Cottura glasura/Add-On con glasura	m.V.	757	06:00	108	1382	01:00	842	1380	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		7	Add-On dopo cottura di glasura	m.V.	757	06:00	108	1274	01:00	842	1272	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
IPS InLine		21	1/2. cottura Opaquer in polvere	m.V.	757	04:00	180	1760	02:00	842	1758	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		22	1/2. cottura Opaquer in pasta	m.V.	757	06:00	180	1706	02:00	842	1704	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		23	1/2. cottura Margin	m.V.	757	04:00	108	1706	01:00	842	1704	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		24	1. cottura Dentina/Incisal	m.V.	757	04:00	108	1670	01:00	842	1668	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		25	2. cottura Dentina/Incisal	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		26	Cottura Margin Add-On	m.V.	757	04:00	108	1652	01:00	842	1650	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		27	Add-On dopo cottura Dent/Incis	m.V.	757	04:00	108	1580	01:00	842	1578	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		28	Cottura supercolori Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		29	Cottura supercolori InLine	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		30	Cottura di glasura Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1526	01:00	842	1524	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		31	Cottura di glasura InLine	m.V.	757	06:00	108	1562	02:00	842	1560	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		32	Add-On dopo cottura di glasura	m.V.	757	04:00	108	1274	01:00	842	1272	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
IPS Empress Esthetic + CAD		41	Cottura Wash	m.V.	757	04:00	108	1544	02:00	842	1542	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		42	1/2. Cottura Incisal	m.V.	757	04:00	108	1526	02:00	842	1524	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		43	Cottura Universal Shade / Stains	m.V.	757	06:00	180	1454	01:30	842	1452	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		44	Cottura supercolori Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		45	Cottura glasura universale	m.V.	757	06:00	180	1454	01:30	842	1452	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		46	Cottura glasura Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		47	Add-On	m.V.	757	04:00	108	1418	02:00	842	1416	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
IPS e.max Press tecnica di pittura		61	Cottura supercol. e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		62	Cottura supercol. Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		63	Cottura glasura e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		64	Cottura glasura Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		65	Add-On dopo glasura	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
IPS e.max Press stratificazione		81	Wash (Foundation)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		82	Wash caratterizzazione	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		83	1/2. Cottura Dentina / Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		84	Cottura supercol. e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		85	Cottura supercol. Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		86	Cottura glasura e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		87	Cottura glasura Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		88	Add-On c.cott.glas.e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		89	Add-On con cot.glasura Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		90	Add-On dopo glasura	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
IPS e.max ZirPress tecnica pittura		101	ZirLiner prima del wax-up	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		102	Cottura supercolori e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		103	Cottura supercolori Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		104	Cottura glasura e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		105	Cottura glasura Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		106	Add-On dopo glasura	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
IPS e.max ZirPress stratificazione		121	ZirLiner prima del wax-up	m.V.	757	04:00	72	1760	01:00	842	1758	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		122	Wash (Foundation)	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		123	Wash caratterizzazione	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		124	1/2. Cottura Dentina / Incisal	m.V.	757	04:00	162 / 36	1202 / 1346	00:00 / 02:00	752 / 1202	1202 / 1344	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		125	Cottura supercol. e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		126	Cottura supercolori Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		127	Cottura glasura e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		128	Cottura glasura Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		129	Add-On c.cott.glas.e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1337	01:00	842	1335	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		130	Add-On con cot.glasura Ivocolor	m.V.	757	06:00	108	1310	01:00	842	1308	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		131	Add-On dopo glasura	m.V.	757	06:00	90	1292	01:00	842	1290	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
Tecnica di pittura IPS e.max ZirCAD		141	Cottura supercolori Ivocolor	m.V.	757	06:00	81	1310	01:00	842	1308	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		142	Cottura glasura Ivocolor	m.V.	757	06:00	81	1310	01:00	842	1308	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		150	Cottura di rigenerazione	o.V.	757	00:18	117	1922	15:00	spento	spento	1382	45	spento	00:00	spento
IPS e.max CAD Crystall/Glaze		161	Cristallizzazione LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	spento	spento	00:00	Modo cristallizzazione
		162	Cottura supercolori/correzione	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 03:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	spento	spento	00:00	Modo cristallizzazione
		163	Unione/cristalliz. CAD-on	m.V.	757	02:00	54 / 54	1526 / 1562	02:00 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1130	spento	757	06:00	Modo unione
		164	Glasura/Correzione Cad-on	m.V.	757	06:00	108 / 54	1526 / 1562	00:10 / 03:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1130	spento	spento	00:00	Modo cristallizzazione
		165	Cristallizzazione Speed	m.V.	757	00:30	216 / 126	1562 / 1598	00:00 / 03:30	1274 / 1562	1562 / 1598	1301	spento	860	00:01	spento
		166	Cristallizzazione MO/Imp./LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	108 / 54	1436 / 1580	00:10 / 10:00	1022 / 1436	1436 / 1580	1310	spento	spento	00:00	Modo cristallizzazione
IPS e.max CAD tecnica di pittura		181	Cristallizzazione LT/MT/HT	m.V.	757	06:00	162 / 54	1526 / 1562	00:10 / 07:00	1022 / 1526	1526 / 1562	1310	spento	spento	00:00	Modo cristallizzazione
		182	Cottura supercol. e.max Ceram	m.V.	757	06:00	108	1418	01:30	842	1416	spento	spento	spento	00:00	Modo standard
		183	Cottura supercolori Ivocolor	m.V.	757	06:00</										