

Virtual[®] 380

自動練和器対応 歯科用シリコン印象材 バーチャル XL

高精度 かつ、
経済的 な印象材



Virtual® 380

自動練和器対応 歯科用シリコン印象材 バーチャル XL

高精度印象材「バーチャル」の、自動練和器対応大容量サイズです。1本(380mL)でバーチャル カートリッジ (50mL) の7.6本分に相当します。2種類の粘度を持ち、単一印象および連合印象によるC&Bや義歯、インプラント 上部構造などに幅広く適応します。

自動練和でスムーズに

ガンタイプのディスペンサーでは押し出す力が必要なトレー材も、スムーズに盛り付けられます。術者による盛り付け時間などのばらつきを解消でき、いつでも同じ条件で印象採得できます。操作性時間に余裕ができるため、印象材の性能を最大限に引き出せます。

特長

- ・親水性と濡れ性が高く、唾液や血液が存在する口腔内でも精密な印象採得ができます。
- ・寸法安定性がよく、2週間以内は複数の模型を製作できます。
- ・弾性回復力に優れ、印象撤去時の変形や歪みを速やかに回復します。
- ・カートリッジタイプなので、そのまま自動練和器にセットできます。
- ・2種類の硬化時間* (ファースト、レギュラー) が選択できます。

*モノフェーズはファーストのみ



ヘビーボディ

モノフェーズ

ステップ



自動練和器にカートリッジをセットし、2カ所から材料が出るのを確認する。



ダイナミックミキサー、ロッキングリングの順で取り付けて使用する。

テクニカルデータ

種類	モノフェーズ ファースト	ヘビーボディ	
		ファースト	レギュラー
操作時間(25°C)	1分	1分	1分30秒
口腔内保持時間	3分30秒	2分30秒	4分30秒
弾性ひずみ	2 ~ 20%	0.8 ~ 20%	
永久ひずみ	0 ~ 3.5%	0 ~ 3.5%	
線寸法変化率	0 ~ 1.5%	0 ~ 1.5%	

製品内容

バーチャル XL 各380mL×2
(ダイナミックミキサー 15個、ロッキングリング 2個付属)

- 594838AN モノフェーズ ファースト
- 594839AN ヘビーボディ ファースト
- 594840AN ヘビーボディ レギュラー



ダイナミックミキサー 600158 50個×1

ロッキングリング 600159 2個×1



一般的名称：歯科用シリコン印象材 / 販売名：バーチャル XL / 認証番号：226AGBZX00049000 / 管理医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24

TEL: 03-6801-1301 FAX: 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

info.japan@ivoclarvivadent.com

PR0028B01

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation