

Digital Shade Assistant

Il colore preciso in modo semplice e pratico



Riconoscere
il colore dentale – in modo
semplice ed affidabile



ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Digital Shade Assistant

Con il Digital Shade Assistant Starter-Kit in combinazione con il Programat® P710 e la tecnica digitale, in futuro può determinare il colore dentale in modo semplice ed affidabile. I tempi in cui il si sceglieva il colore dentale sbagliato sono passati. Il colore dentale può ora essere determinato e controllato semplicemente con questo DSA Starter Kit.



Così semplice:



1. Scegliere i tre denti della scala colori* più simili
2. Inserire i denti della scala colori nel supporto del Digital Shade Assistant
3. Posizionare il supporto DSA al paziente
4. Realizzare una fotografia digitale con la corretta inquadratura.

* Il Digital Shade Assistant System è compatibile esclusivamente con le seguenti scale colori:

- Ivoclar Vivadent A-D Shade-Guide
- Ivoclar Vivadent scala colori Chromascop



5. Trasferire le immagini fotografiche al Programat P710 ed eseguire il confronto cromatico con la funzione DSA.



Questo è un prodotto della categoria "protesi fissa". I prodotti di questa categoria sono calibrati in modo ottimale fra di loro.



Confezionamento:
679917 Digital Shade Assistant-Starter-Kit
1 scala colori (A-D)
3 supporti DSA
1 Istruzione breve