

Programat®

USB hafıza kullanarak yazılım güncelleme talimatları (P310, P510, P710, EP 3010, EP 5010, CS2):

Yazılım Güncellemeleri USB Hafıza kullanılarak kolayca fırına yüklenebilir. Bunun için, güncel yazılım dosyasının bulunduğu (örn. P510:V1.10.iv). USB hafızadaki yazılım versiyonunun fırında yüklü bulunandan güncel olması gereklidir.

Programat fırınlara ait ücretsiz yazılım güncellemelerine www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter adresinden ulaşabilirsiniz

Yazılım Güncelleme birkaç adımda tamamlanır:


1. Yazılım Güncelleme menüsünü açın
Ana sayfada [Yazılım Güncelleme] butonuna basın.
2. Yazılım Güncellemeyi başlatın
Yazılımın bulunduğu USB hafıza takılıysa, fırın otomatik olarak uygun yazılımı bulur. USB takılı değilse bu aşamada takmanız gereklidir.

[Başlat] butonuna basın.

3. Durum çubuğu güncellemenin ilerleyişini gösterir.
Bu esnada fırını kapatmayın veya USB çubuğu çıkarmayın

4. Yazılım Güncellemeyi tamamlayın
Aşağıdaki mesajlar görülür:

- ✓ Yazılım başarıyla güncellendi
- ✗ Yazılım Güncelleme başarısız

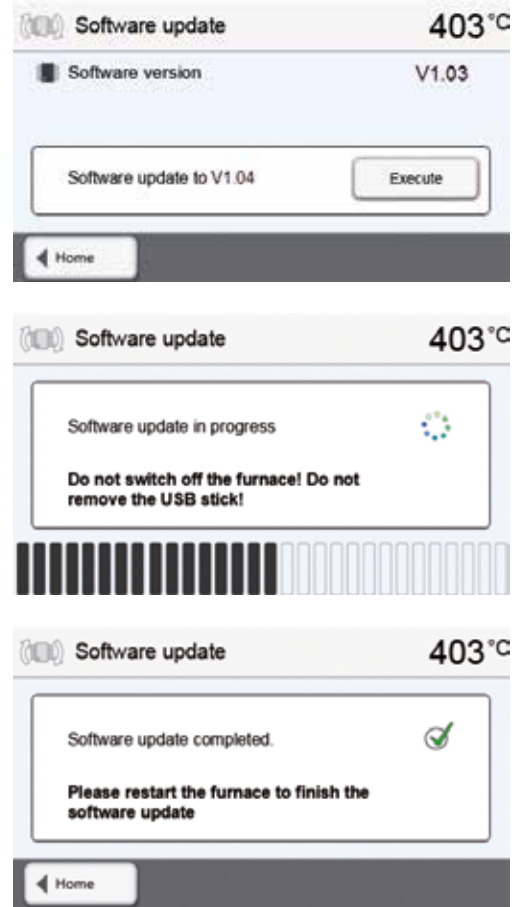

Yazılım Güncellemenin tamamlanması için fırının arkasındaki açma-kapama düğmesi kullanılarak fırının yeniden başlatılması gereklidir.



Önemli Not

Yazılım güncellemesi sırasında Ivoclar Vivadent programları güncellenerek varsa yapmış olduğunuz değişiklikler sıfırlanacaktır. Bireysel programlar yazılım güncellemeden etkilenmez..