

Programat® CS4

Estructuración de programas

Programa	Nombre	Descripción	Duración	Programat® Sinter Tray	IPS e.max® CAD Crystallization Tray	IPS e.max® CAD Speed Crystallization Tray
1	IPS e.max® ZirCAD MT Multi Sinterización rápida corona	Programa para la sinterización rápida de coronas de IPS e.max ZirCAD MT Multi incluido el presecado	60 min*	✓**		
2	IPS e.max® ZirCAD MT Multi Sinterización corona/puente	Programa para la sinterización de coronas/puentes de IPS e.max ZirCAD MT Multi con estética mejorada incluido el presecado	114 min*	✓**		
3	IPS e.max® ZirCAD LT Sinterización rápida	Programa para la sinterización rápida de IPS e.max ZirCAD LT incluido el presecado	27 min*	✓**		
4	IPS e.max® ZirCAD LT Sinterización	Programa para la sinterización de IPS e.max ZirCAD LT con estética mejorada incluido el presecado	47 min*	✓**		
5	IPS e.max® ZirCAD Cocción de Maquillaje/Glaseado	Programa para la cocción de Maquillaje/Glaseado de los materiales IPS e.max ZirCAD con IPS e.max CAD Crystall./	19 min	✓**	✓	
6	IPS e.max® CAD Cristalización rápida (HT, MT, LT)	Programa para la cristalización rápida de IPS e.max CAD, HT, MT o LT	17 min	✓**		✓
7	IPS e.max® CAD Cristalización LT, MT, HT	Programa para la cristalización rápida de IPS e.max CAD, HT, MT o LT	26 min	✓**	✓	
8	IPS e.max® CAD Cristalización (MO, Impulse)	Programa para la cristalización rápida de IPS e.max CAD, MO o Impulse	33 min	✓**	✓	
9	IPS e.max® CAD Cocción de Corrección/Maquillaje/Glaseado	Programa para la cocción de Corrección, Maquillaje/Glaseado de los materiales IPS e.max CAD con IPS e.max CAD Crystall./	22 min	✓**	✓***	✓***
10	IPS Empress® CAD Cocción de Maquillaje/Glaseado	Programa para la cocción de Maquillaje/Glaseado de los materiales de IPS Empress CAD con IPS e.max CAD Crystall./	22 min	✓**	✓	
11–30	Programas individuales			✓**	(✓)****	(✓)****

* Duración con presecado. La duración se prolonga de 8 a 10 minutos cuando se incluye tiempo para el presecado.

* Siempre debe usarse el Programat Sinter Tray

** Usar IPS e.max CAD Crystallization Tray y IPS e.max CAD Speed Crystallization Tray

*** Dependiendo del tipo de programa, usar una bandeja de cristalización indicada. No indicado para programas de sinterización.



Encontrará más información en las correspondientes Instrucciones de uso del material en uso.

Versión: 2

Fecha de edición: 2019-01

689833/ES