

Confezionamenti

Siringa Automix

Refill MultiCore Flow 10 g

1 siringa Automix MultiCore Flow, 10 g
Accessori

Disponibile nei colori: light, medium e white



Cartuccia

Refill MultiCore Flow 50 g

1 cartuccia MultiCore Flow, 50 g
20 cannule di miscelazione
20 beccucci intraorali

Disponibile nei colori: light, medium e blu



MultiCore® Flow



Ivoclar Vivadent srl & C. sas

Via-Gustav-Flora, 32
39025 Naturno (BZ)
Tel. 0473/670111
Fax 0473/667780
e-mail: info@ivoclarvivadent.it

Ivoclar Vivadent Divisione Clinical

Via Isonzo, 67/69
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051/591384 | Fax. 051/593317
clinical@ivoclarvivadent.it

www.ivoclarvivadent.it

**ivoclar**
vivadent
passion vision innovation

Ora anche in siringa
Automix da 10 g!

MultiCore® Flow



Composito per la ricostruzione di monconi,
autoindurente con fotoindurimento opzionale.

**ivoclar**
vivadent
passion vision innovation

MultiCore Flow ad alto scorrimento

Per la tecnica con matrice

MultiCore Flow è un composito autoindurente con fotoindurimento opzionale ed eccellenti proprietà meccaniche per la ricostruzione di monconi di denti vitali e devitalizzati.


MultiCore Flow ora è disponibile anche nella **siringa Automix da 10 g** nei colori light (A1/B1), medium (A2/A3) e white, oltre al confezionamento in **doppia cartuccia da 50 g**, che prevede l'utilizzo di un apposito dispenser manuale per l'applicazione.




Un ulteriore campo d'impiego di MultiCore Flow è la **cementazione adesiva di perni in fibra di vetro**.

Documentato dal successo clinico

Cementazione di perni radicolari e ricostruzione di monconi con MultiCore Flow

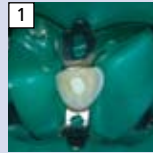

1 Situazione iniziale

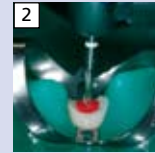

2 Preparazione del moncone



3 Applicazione dell'adesivo AdheSE DC



4 Cementazione del perno con MultiCore Flow




5 Ricostruzione con MultiCore Flow



6 Ricostruzione del moncone ultimata


La scelta giusta per ogni impiego

Auto o fotoindurimento

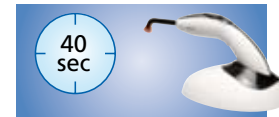

MultiCore è un composito autoindurente (tempo di presa 4-5 minuti), in cui l'opzione della fotopolimerizzazione (40 sec. per ogni superficie) permette all'operatore di influenzare attivamente la presa.

Diversi colori



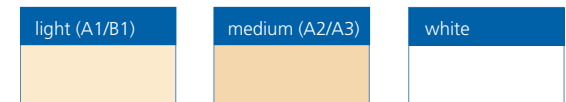


L'adesivo adeguato

MultiCore Flow costituisce un sistema calibrato, che grazie alla combinazione con l'adesivo auto-mordenzante AdheSE può essere inoltre utilizzato con l'attivatore DualCure per la cementazione di perni radicolari e restauri indiretti. Naturalmente potranno essere utilizzati anche gli affermati sistemi adesivi Syntac, ExcITE ed ExcITE DSC della Ivoclar Vivadent.



Pluriennale esperienza

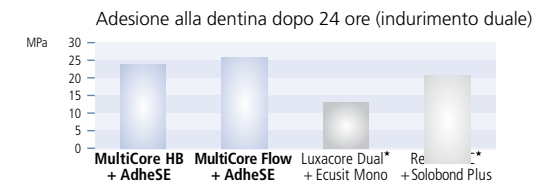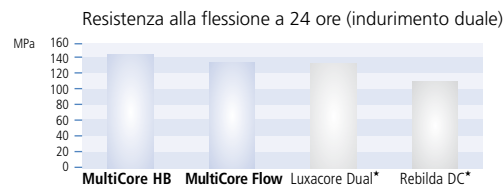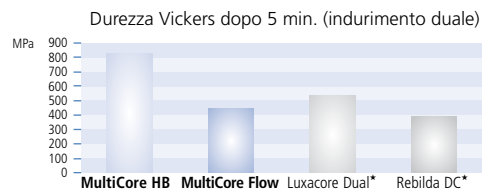

* non sono marchi registrati Ivoclar Vivadent

La pluriennale esperienza di Ivoclar Vivadent nel campo della tecnologia dei compositi è documentata da MultiCore, che si contraddistingue per le caratteristiche fisiche convincenti (durezza, resistenza alla flessione e valori di adesione).

Fonte: R&D, Ivoclar Vivadent AG, Schaan 2004